

Pflege und Wartung CN Motorhandstück

Spannzange von Zeit zu Zeit, je nach Verschmutzungsgrad, gründlich reinigen und an der Außenseite leicht mit Spezialfett (51/1) einfetten (siehe Spannzangenwechsel).



In regelmäßigen Abständen die Spitze (21) abschrauben und den vorderen Teil des Handstückes mit einem Pinsel reinigen. Darauf achten, dass das Handstück wie auf dem Bild gehalten wird (Spannzange nach unten), damit der Schmutz nach vorne herausfallen kann.

Da das CN Motorhandstück weder Kollektoren, noch Kohlen und Lüftungsöffnungen hat, ist keine weitere Wartung erforderlich.

ACHTUNG: - Motorhandstücke nicht für Naßbearbeitung verwenden und keinesfalls mit Druckluft reinigen!
- Niemals die Werkzeugspannung öffnen, solange das Motorhandstück in Betrieb ist!

Spannzangenwechsel

- 1 Spannzange öffnen und Werkzeug entnehmen.
- 2 Handstückspitze Nr. 5113 (21) mittels mitgeliefertem Gabelschlüssel Nr. 5158 (23) oder einem Geldstück abschrauben (Rechtsgewinde).
Gabelschlüssel in die beiden Flächen der Welle stecken und mit dem beigefügten Spannzangenschlüssel Nr. 4115 (22) in die Spannzange eingreifen.
Gabelschlüssel festhalten und durch Drehen des Spannzangenschlüssels entgegen dem Uhrzeigersinn die Spannzange lösen und herausdrehen
- **Spannzange hat Rechtsgewinde !**
- 3 Spannzange reinigen, außen leicht einfetten und in die Welle einsetzen. Mit Schlüsseln wie unter Punkt 2 beschrieben die Spannzange im Uhrzeigersinn bis Endanschlag einschrauben und leicht anziehen.
Handstückspitze Nr. 5113 (21) aufschrauben.

Bitte beachten:

Die Spannzangenschlüssel Nr. 4115 und Nr. 5158 befinden sich in der Unterseite der Handstückablage.

Achtung:

Beim Lösen der Spannzange Motorhandstück mit Spannzange nach unten halten um gelösten Schmutz nach vorne herausfallen zu lassen.

Skizze:

