


Pflege und Wartung SM 78 Motorhandstück

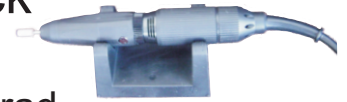

Spannzange: von Zeit zu Zeit, je nach Verschmutzungsgrad, gründlich reinigen und an der Außenseite mit Spezialfett (51/1) einfetten (siehe Spannzangenwechsel).

ACHTUNG: SM Motorhandstücke nicht für Naßbearbeitung verwenden und keinesfalls mit Druckluft reinigen!

SM Motorhandstücke nicht ölen oder schmieren!

Auswechseln bzw. Reinigen der Spannzange

1. Spannzange öffnen
2. Mit Spannzangenschlüssel in die Spannzange eingreifen, diese ruckartig lösen und entgegen dem Uhrzeigersinn herausschrauben.
4. Neue bzw. gereinigte und gefettete Spannzange einsetzen und mit Spannzangenschlüssel wieder leicht festdrehen.

Lässt sich die Spannzange nach längerer Benutzung nicht lösen, Handstück vom Motor trennen. Dazu die Überwurfmutter (10) vollständig lösen (eventuell Fräseschaft $\varnothing 2,35$ zu Hilfe nehmen). Dann mit Gegenhalteschlüssel am Mitnehmer gehalten.

Achtung:

Beim Lösen der Spannzange Motorhandstück mit Spannzange nach unten halten um gelösten Schmutz nach vorne herausfallen zu lassen.

Bitte beachten:

Spannzangenschlüssel und Gegenhalteschlüssel finden Sie in der Unterseite der Handstückablage!



Gegenhalteschlüssel 4113

Spannzangenschlüssel 4115

