

Pflegehinweise

Lupe

Art.-Nr. 4430



Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause Schick entschieden haben und wünschen Ihnen mit Ihrer neuen Lupe viel Erfolg und Freude bei der Arbeit.

Einsatz und Gebrauch:

Die Lupe wurde als Aufsatzlupe für Schutzscheiben am zahntechnischen Arbeitsplatz konzipiert. Durch die zwei Haftsauger kann die Lupe individuell je nach Bedürfnis des Anwenders ideal auf der Schutzscheibe positioniert werden.

Pflegehinweise:

Damit Sie möglichst lange einen ungetrübten Blick durch die Lupe genießen können, möchten wir Sie bitten, einige Dinge bei der Pflege und Reinigung zu beachten:

- Nicht mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln in Kontakt bringen.
- Um Kratzer zu vermeiden, das Lupenglas nur mit speziellen Brillenputztüchern reinigen.
- Die Haftsauger bei nachlassendem Haftvermögen unter fließend Wasser reinigen.



Lupe Art.-Nr. 4430



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
E-Mail info@schick-dental.de
Internet www.schick-dental.de